

使用說明書

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

產品敘述

本產品為經去細胞處理之豬膠原蛋白材料。本產品覆蓋於傷口上可吸收滲出液，維持傷口濕潤及覆蓋。在使用前，經復水處理後即可服貼於傷口之上。多種尺寸之敷料可供選擇。

適應症

本產品適用範圍為以下傷口類型：

- 潰瘍
- 第一、二度燒燙傷
- 創傷傷口(擦傷、割傷、皮膚撕裂傷)
- 手術傷口(皮膚捐贈區和移植區、雷射術後造成之皮膚傷口、傷口破裂)

使用說明

- 1.使用前應先進行清創處理，移除壞死與疤痕組織。
- 2.以無菌操作方式將本產品自包裝取出，將敷料裁剪適當大小。
- 3.若傷口表面乾淨(無滲出液)，則以無菌生理食鹽水或乳酸林格氏液潤濕。
- 4.將本產品小心覆蓋於傷口上。
- 5.依照傷口位置、大小、深淺度及使用者需求等，選擇合適之二次敷材覆蓋並固定敷料。
- 6.視傷口滲出液情形，進行清理並以新的敷料置於未覆蓋之傷口區域，傷口與敷料需維持濕潤、清潔的環境。
- 7.勿強行自傷口移除本產品，需以無菌生理食鹽水或乳酸林格氏液溫和沖洗傷口，直至敷料鬆脫再取下。
- 8.持續進行傷口的照護直至傷口癒合。

貯存

未開封且包裝完整之產品應保存於乾燥室溫環境中(25°C以下)。

有效期間

2年。

包裝

本產品最終以雙層滅菌袋包裝，並以加馬輻射照射進行滅菌。如產品包裝有開啟或破損之情形，則無法保證無菌。

禁忌症

對豬組織來源物質過敏之病患。

副作用

可能的不良反應與併發症包括但不限於下列反應：感染、慢性發炎、過敏反應、不明原因的發燒、發冷、過度紅腫、疼痛、腫脹等。如發生以上症狀，立即停止使用並通知醫護人員。

注意事項

- 禁止重複使用。
- 禁止重複滅菌。
- 如包裝有破損情形，則禁止使用。
- 需於產品有效期間內使用。

警告

本產品需經合格醫師指示使用。

型號規格

型號	公制尺寸
ACM01H0	1cm x 2cm
ACM0AH0	1cm x 5cm
ACM02H0	2cm x 2cm
ACM03H0	2cm x 3cm
ACM0BH0	2cm x 5cm
ACM04H0	3cm x 4cm
ACM0CH0	3cm x 5cm
ACM0DH0	3cm x 10cm
ACM0TH0	4cm x 7cm
ACM0UH0	4cm x 12cm
ACM05H0	5cm x 5cm
ACM0VH0	5cm x 6cm
ACM0EH0	5cm x 10cm
ACM0JH0	6cm x 8cm
ACM0WH0	6cm x 12cm
ACM0KH0	7cm x 12cm
ACM0LH0	8cm x 12cm
ACM0MH0	10cm x 10cm
ACM0NH0	10cm x 15cm

型號	公制尺寸
ACM01H4	1cm x 2cm (割紋)
ACM0AH4	1cm x 5cm (割紋)
ACM02H4	2cm x 2cm (割紋)
ACM03H4	2cm x 3cm (割紋)
ACM0BH4	2cm x 5cm (割紋)
ACM04H4	3cm x 4cm (割紋)
ACM0CH4	3cm x 5cm (割紋)
ACM0DH4	3cm x 10cm (割紋)
ACM0TH4	4cm x 7cm (割紋)
ACM0UH4	4cm x 12cm (割紋)
ACM05H4	5cm x 5cm (割紋)
ACM0VH4	5cm x 6cm (割紋)
ACM0EH4	5cm x 10cm (割紋)
ACM0JH4	6cm x 8cm (割紋)
ACM0WH4	6cm x 12cm (割紋)
ACM0KH4	7cm x 12cm (割紋)
ACM0LH4	8cm x 12cm (割紋)
ACM0MH4	10cm x 10cm (割紋)
ACM0NH4	10cm x 15cm (割紋)

型號	英制尺寸
ACM0XH1	0.4" x 2"
ACM06H1	1" x 1"
ACM07H1	1.5" x 1.5"
ACM08H1	1" x 1.5"
ACM09H1	1.5" x 2"
ACM0YH1	1.6" x 2.8"
ACM0ZH1	1.6" x 4.7"
ACM10H1	2" x 2"
ACMA0H1	2" x 2.4"
ACMA1H1	2.4" x 4.7"
ACM0OH1	2.5" x 3"
ACM0PH1	3" x 5"
ACMA2H1	3.1" x 4.7"
ACM0QH1	3.5" x 4.5"
ACM0RH1	4" x 4"
ACM0SH1	4.5" x 5"

型號	英制尺寸
ACM0XH4	0.4" x 2" (割紋)
ACM06H4	1" x 1" (割紋)
ACM07H4	1.5" x 1.5" (割紋)
ACM08H4	1" x 1.5" (割紋)
ACM09H4	1.5" x 2" (割紋)
ACM0YH4	1.6" x 2.8" (割紋)
ACM0ZH4	1.6" x 4.7" (割紋)
ACM10H4	2" x 2" (割紋)
ACMA0H4	2" x 2.4" (割紋)
ACMA1H4	2.4" x 4.7" (割紋)
ACM0OH4	2.5" x 3" (割紋)
ACM0PH4	3" x 5" (割紋)
ACMA2H4	3.1" x 4.7" (割紋)
ACM0QH4	3.5" x 4.5" (割紋)
ACM0RH4	4" x 4" (割紋)
ACM0SH4	4.5" x 5" (割紋)

包裝符號說明



注意



請參閱使用說明書



製造廠



製造日期



有效期間



產品型號



產品批號

STERILE | R 經輻射滅菌



無致熱原



請勿重複使用



請勿再次滅菌



若包裝破損請勿使用



由此處開啟



保持乾燥



避免日曬



溫度限制

藥商/製造廠

名稱：亞果生醫股份有限公司

地址：南部科學工業園區高雄市路竹區路科二路57號3樓

電話：07-6955569

傳真：07-6955069

電郵：service@acrobiomedical.com

網址：www.acrobiomedical.com